

OZEAN

FICHA TÉCNICA

OZEAN está indicada para el alivio prolongado de los síntomas de sequedad ocular, y otras molestias como la sensación de escozor, picor, quemazón, fatiga ocular o sensación de presencia de cuerpo extraño.

Estas molestias son inducidas por diversos factores: polvo, humo, ambientes secos, aire acondicionado, Uso Prolongado de Dispositivos Digitales o el uso de lentes de contacto, entre otros.

Confort de larga duración

Mejora la estabilidad y el volumen de la película lagrimal

Con Cycarthyn®, un componente biotecnológico

Para condiciones ambientales adversas

Solución hipotónica

INGREDIENTES:

Cycarthyn® 0,065 g, Hipromelosa 0,24 g, Glicerina, Cloruro magnésico, Cloruro potásico, Cloruro cálcico, Ácido bórico, Borax decahidrato, Agua purificada 100 ml.

MODO DE EMPLEO:

- En la primera utilización, compruebe la presencia del precinto de seguridad y a continuación retírelo.
- Retire la tapa protectora, Incline la cabeza hacia atrás y empuje suavemente el párpado inferior hacia abajo con los dedos para facilitar la instilación del producto.
- Ponga el frasco en posición vertical e invertido y presione el frasco hasta que se vierta 1-2 gotas sin que la punta toque roce la superficie.
- Tras la instilación, parpadee varias veces. Coloque la tapa protectora para cerrar el producto después de cada uso.

Puede utilizar OZEAN hasta 8 veces al día.

CONSERVACIÓN:

No utilizar fuera de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Conservar el producto entre 8°C y 25°C

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

Fecha de la última revisión: 2021/1

PRESENTACIÓN:

OZEAN 10 ml. Multidosis

CÓDIGO NACIONAL.: OZEAN 10 ml. Multidosis 205142.3

Fabricado en UE.